



F&A Biflu LC

F&A Biflu LC – однокомпонентный лак с содержанием фтора, который выступает герметиком дентинных канальцев и обладает высокими свойствами твердения. Материал широко используется в качестве препарата для лечения гипертензии ткани зуба, профилактики кариеса, а также применяется при запечатывании дентинных канальцев.

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:

- профилактика;
- фторирование;
- снижения чувствительности;
- защита;
- снижение бактериальной активности;
- изоляция поверхности зубов;
- запечатывание дентинных канальцев и многие другие.

Применяют фторированный лак при изоляции поверхностей зуба, после проведения его механической обработки.

ДОСТОИНСТВА:

- содержит фтор-фосфат кальция, биоактивное стекло и фторид кальция;
- отличается идеальной консистенцией;
- насыщает ткани зуба ионами фтора;
- обладает высоким антибактериальным действием.

Материал имеет прозрачный цвет, поэтому не изменяет натуральный оттенок зубной эмали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- предварительная обработка;
 - при помощи аппликатора или специализированной кисти препарат тонким слоем наносится на поверхность зуба;
 - действует препарат на протяжении нескольких секунд, после чего необходимо осуществить просушку с помощью воздушной струи;
 - для отверждения необходимо воспользоваться полимеризатором на протяжении 10 секунд;
 - удаление ингибированного кислородного слоя с использованием ватного валика.
- По окончании процедуры на протяжении нескольких дней материал остается на поверхности зуба создавая своеобразный защитный барьер и выполняя профилактические действия.



УПАКОВКА: F&A Biflu LC – бифторидный лак выпускается во флаконе объемом 10 мл или набором аппликаторов.

