



F&A Biflu

F&A BIFLU – бифторидный лак, который широко используется в качестве лечебного средства при гипертензии тканей зуба. Материал является идеальным вариантом при осуществлении профилактики кариеса и запечатывания дентинных канальцев. Бифторидный лак химического свойства отличается быстрым высыханием, что упрощает работу.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- фторирование зубов;
 - в качестве профилактики после осуществления полировки или терапевтических процедур;
 - снижение чувствительности тканей зуба;
 - создание защитного барьера в полостях зуба;
 - защиты эрозий;
 - после операционной обработки эмалевых участков, которые подверглись воздействию кислот;
 - подавление бактериальной активности.
- Применяется для изоляции поверхностей зубов после осуществления их механической обработки.

ДОСТОИНСТВА:

- комфортное использование обусловленное быстрым высыханием материала;
- высокое содержание фторидов кальция и натрия;
- идеальная тягучая консистенция;
- качественное средство против кариеса;
- высокое содержание тимол, что гарантирует антибактериальное действие.

Отдают предпочтение данному препарату в связи с тем, что он имеет прозрачную консистенцию и способен близко прилегать к корневым каналам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- предварительно очищается и высушивается поверхность зуба;
- лаком обрабатывается аппликатор;
- при помощи аппликатора материал наносится на поверхность зубов;
- слой должен быть тонким;
- для использования материала в качестве изолятора необходимо применять не аппликатор, а специализированную кисточку;
- препарат находится на полости зуба на протяжении нескольких секунд, после чего осуществляется просушка воздушной струей. Бифторидный лак остается на поверхности зуба образуя пленку водостойкого характера, которая остаётся на протяжении нескольких дней.

