



MerFill BOND SE

MerFill Bond SE – самопротравливающийся двухкомпонентный универсальный фотополимерный адгезив, что обеспечивает замечательный бондинг к дентину, эмали, композитов, металла и амальгамы.

ПРЕИМУЩЕСТВО:

Простая, быстрая и экономичная техника нанесения.

- Содержит компоненты, обеспечивающие эластичность при работе со всеми типами композитов за счет создания эластичного гибридного слоя. Такой эластичный гибридный слой снижает риск возникновения микроподтеканий за счет высокой упругости и устойчивости к излому.
- Не содержит ацетон или другие соединений, раздражающие пульпу.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Самопротравливающая адгезивная система для реставрации всех классов.
- адгезивная система для фиксации не прямых реставраций из композитных материалов и керамики
- Защитный лак для пришеечных участков зубов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Препарирование зуба.

Препарируют зубы стандартными методами. Тщательно удалите поврежденные ткани зуба. Очистите полость от пыли, образовавшейся после препарирования с помощью воды, про-

сушите воздухом или ватными тампонами. Не допускайте пересушивания.

- протравливания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Непрепарированную эмаль нужно тщательно очистить с помощью полировочной пасты или интраорального пескоструйного аппарата. Протравливания эмали осуществляется с помощью стандартных гелей в течение 15 - 20 секунд.

Препарированную эмаль можно выборочно протравить для усиления адгезии. Нанесите травильный гель на эмаль, включая нависающие края эмали. Оставьте на 15 - 20 секунд. Хорошо промойте водой, а затем просушите струей воздуха. Не пересушивает.

- ЗАЩИТА пульпы.

Чтобы избежать раздражения пульпы, перекройте участок у пульпы Кальцийсодержащие прокладками.

УПАКОВКА: MerFill Bond Препарат выпускается в шприцах по 3 мл.

