



MerFill BOND

MerFill Bond – однокомпонентный клей с высокими адгезивными свойствами. Однокомпонентный клей является универсальным и обеспечивает качественную сцепку с эмалью, дентином, любыми композитами, керамикой, металлами. Идеальная адгезия с другими материалами. Сила сцепки с дентином составляет 40 МПа за 24 часа.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для композитных реставраций;
 - в качестве вспомогательного материала для полости под амальгамную реставрацию;
 - идеальный вариант в качестве защиты для сверхчувствительных участков зубов.
- Препарат широко используется для крепления компонентов, виниров и эмали.

ДОСТОИНСТВА:

- многогранная совместимость с реставрационными материалами;
 - простота эксплуатации;
 - высокий уровень адгезии;
 - длительный срок годности;
 - экономичный расход.
- Важно отметить, что материал не содержит ацетона и иных компонентов, которые могут раздражать пульпу. Однокомпонентный состав не требует хранения в холодильнике.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- протравливание;
- нанесение адгезивного состава с использованием кисточки;
- покрытие несколькими слоями клея;
- полимеризация на протяжении 10 секунд;
- пломбировка зуба соответствующим компонентом.

На этапе нанесения однокомпонентного адгезива необходимо минимизировать попадание загрязнения в рабочую область.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Осуществляя реставрацию в ротовой полости пятого класса прилегающие края эмали необходимо сделать скошенными и протравленными стандартным методом. Дентин и эмаль предварительно необходимо очистить при помощи полировочной пасты, которая не содержит фтор и подсушить сжатым воздухом.

Использование при гиперчувствительности:

- очистить пришеечную область зуба с использованием резиновой чашечки и профилактической пасты;
- смыть пасту жидкостью;
- просушить воздухом, предотвращает пересушивания;
- нанести однокомпонентный клей.

Дальнейшие действия связанные с реставрацией осуществляются стандартным методом.

УПАКОВКА: MerFill Bond Однокомпонентный адгезив выпускается во флаконе объемом 6 г.

