



F&A Calcipaste

F&A Calcipaste – пастообразный материал, обогащённый гидроксидом кальция и предназначенный для защиты пульпы и временного пломбирования корневых каналов. Материал на водной основе с гидроксидом кальция изготовлен по уникальной технологии, что гарантирует высокую биологическую активность препарата. Состав отличается идеальной структурой и высоким качеством.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- защита пульпы при непрямом покрытии;
- для защиты при прямом покрытии пульпы;
- при использовании в качестве прокладочного материала;
- для лечебного пломбирования.

Пастообразный материал с гидроксидом кальция широко используется для временного пломбирования корневых каналов.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:

- высокое содержание гидроксида кальция;
 - идеальная текстура;
 - комфортное применение.
- Благодаря специализированным канюли можно обеспечить точное внесение препарата в соответствующую зону ротовой полости.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- очистить поверхность зуба;
- просушить полость;
- при помощи шприца нанести пасту в несколько слоев;
- просушить сжатым воздухом;
- удалить излишки препарата;
- наложить прокладочный материал для дальнейшей реставрации.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Паста может вызывать дискомфорт у пациента на протяжении 24 часов.
2. Категорически запрещено использовать затвердевший материал.



УПАКОВКА: F&A Calcipaste паста с гидроксидом кальция выпускается в шприцах по 2,5 г.

