



F&A Chela GEL/Liquid

F&A Chela GEL/Liquid – хелатный материал для расширения корневых каналов в форме жидкого геля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- расширение корневых каналов;
- дезинфекция;
- выявление устьев каналов;
- распломбирование канала.

ДОСТОИНСТВА:

- содержание ЭДТА 19%;
- растворение дентинных пробок;
- глубокое проникновение;
- облегчает удаление изделий из канала;
- идеальное антибактериальное действие;
- содержит бензалконий хлорид;
- минимальный риск поломки инструмента;
- выпускается в виде жидкого геля.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- промывка канала раствором гипохлорита натрия;
- покрытие F&A CHELA GEL/LIQUID до достижения апекса;
- обработка канала гипохлоритом натрия;
- промывка;
- просушка воздухом;
- пломбировка осуществляется стандартной методикой.



УПАКОВКА: F&A Chela Gel – выпускается в шприце 5 мл.

F&A Chela liquid – выпускается во флаконе 9 мл.

