



F&A Desobtur

F&A Desobtur – растворитель для дезинфекции корневых каналов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- распломбирование корневых каналов.

ДОСТОИНСТВА:

- эффективность;
- содержание поверхностно-активных веществ;
- ароматизирующая отдушка.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- дезинфекция канала с использованием механического инструмента;
- обработка канала зуба;
- вход в канал;
- размещение материала в устье;
- удаление содержимого из канала, смачивая стоматологический инструмент в растворителе;
- повторять действия до полного очищения канала.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- после использования растворителя канал необходимо просушить воздухом перед пломбировкой;
- запрещено использовать препарат на слизистых оболочках полости рта.

