



F&A DUACEM

Универсальный полимерный упрочненный адгезивный цемент двойного действия. Материал широко используется для цементирования накладок, вкладок и в качестве основы для культи выполненной из универсального композитного материала. Адгезивный цемент применяется для фиксации волоконных шинирующих систем, углепластиковых и стекловолоконных штифтов, а также виниров.

Применение:

- цементировка;
- основание для культи из композитного материала;
- создание литых культевых вкладок;
- фиксация мостовидных протезов

ДОСТОИНСТВА:

- нерастворимость;
- содержание фторидов;
- рентгеноконтрастные свойства;
- оптимальная консистенция;
- минимальная толщина пленки;
- высокое содержание наполняемости;
- идеальные адгезивные свойства;
- универсальный оттенок;
- система паста/паста.

Система паста/паста представляет собой сыпучий материал. Состоит он из 2х пакетов различного состава, которые после смешивания превращаются в пасту однородной консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Бондинговые процедуры проводятся в тщательно отчищенной ротовой полости, что способствует предотвращению загрязнения. Рекомендуется использовать коффедаарму.
2. Расположить равные части пасты на специализированную подложку;
3. Смешать до однородной консистенции;
4. Отверждение материала наступает спустя 6 минут, а первичная фиксация через 20 секунд после попадания света.
5. Избегать излишков материала.
6. Высушить.

Рекомендуется использовать барьерный гель для предотвращения ингибированного кислородом слоя.