



F&A Endogil TC

F&A Endogil TC – это идеальный гель для механической обработки корневых каналов. Материал отличается антимикробным эффектом и обеспечивает расширение и очистку труднопроходимых и разветвленных корневых каналов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- использование при инструментальной обработке корневых каналов с применением ирригационных растворов;
- при деструктивных процессах в тканях;
- при инфицированных каналах.

ДОСТОИНСТВА:

- готовая форма;
- глубокое проникновение;
- хелатные свойства;
- искоренение смазанного слоя;
- антимикробное воздействие.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Первое посещение:

- введение материала с помощью пластиковой насадки;
- ирригация корневого канала;
- инструментальное формирование канала;
- завершение ирригации раствором гипохлорита натрия;
- промывка канала водой;
- временная obturation.

Второе посещение:

- механическое удаление гидроксида кальция;
- промывка канала растворами и водой;
- постоянная obturation корневого канала.

Внимание:

При наличии труднопроходимых инфицированных каналов необходимо использовать гель F&A Metro под герметичной повязкой на протяжении трёх дней.