



F&A Hemostat GEL

F&A HEMOSTAT GEL - идеальный гемостатик в форме геля, созданный на основе сульфата алюминия. Гель содержит более чем 25% сульфата алюминия и отличается многогранным применением.

ПОКАЗАНИЕ:

- остановка кровотечений;
- снижение воспалительных реакций;
- ретракция десен;
- уменьшение выделения жидкости при фиксации не прямых адгезивных реставраций.

ДОСТОИНСТВА:

- быстрая остановка кровотечения;
 - эффективная ретракция десен;
 - уменьшение выделений;
 - снижение воспалительных процессов;
 - контроль десневых жидкостей.
- Гель не окрашивает ткани зуба и препарированную область зуба.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- установка насадки на шприц;
- нанесение геля на кровоточащие участки слизистой в полости рта;
- из геля формируется нить;
- время действия не превышает 6 минут;
- удаление нитей;
- промывка;
- просушка воздухом.

Снятие оттисков проходит по стандартной методике.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- запрещён контакт геля с кожными покровами или слизистыми глаз, что может вызвать жжение.
 - попадание геля в пищевод может вызвать рвотный рефлекс.
- Идеальным решением является использование техники из двойной гелевой нити.



УПАКОВКА: F&A Hemostat Gel выпускается в шприце 5 мл.