



MerFill LINE

MerFill Line – однокомпонентный лайнер рентгеноконтрастного типа, выступающий непосредственной базой под реставрацию. Материал отличается высокой биосовместимостью и может выделять фтор на протяжении длительного времени, в связи с тем, что в состав однокомпонентного лайнера входит комплекс фторидов, гидроокиси кальция и гидроксиапатита. Материал выступает прокладочным средством с высокими адгезивными способностями к дентину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в качестве базы под реставрацию;
- в качестве прокладочного материала.

ДОСТОИНСТВА:

- уникальная база под реставрацию;
- усилитель адгезии в метакрилатной матрице;
- высокая адгезия к дентину;
- выделение фтора на протяжении длительного времени обусловленное повышенной биосовместимостью;
- высокая степень непрозрачности, что позволяет осуществлять качественную процедуру реставрации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- качественная подготовка ротовой полости дабы избавиться от следов эвгенола;
 - нанесение слоя материала на поверхность дентина, но важно избегать слой эмали;
 - минимизировать попадание дневного света на материал, что может вызвать его преждевременное отверждение;
 - толщина слоя не должна превышать 0,5 мм;
 - лампу необходимо поднести к поверхности материала не более чем на 20 секунд.
- В том случае, если необходимо создать более толстый слой, тогда такое действие выполняется в несколько этапов.

УПАКОВКА: MerFill Line однокомпонентный лайнер выпускается в шприцах по 3 г.

