



F&A Metro

F&A Metro – антимикробный гель, предназначенный для лечения инфицированных корневых каналов. Стоматологический препарат составляет комбинацию из трех ингредиентов активного типа, растворённых в инертной биополимерной матрицы. Консистенция материала изменяется при 36 градусах, что позволяет материалу проникать глубоко в корневой канал.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- профилактика;
- терапия;
- лечение хронической формы пульпита;
- хроническая периапикальная патология.

ПУЛЬПИТЫ:

- гнойный пульпит острой формы;
- гангренозный хронический пульпит;
- обострённая стадия хронического пульпита.

ПЕРИОДОНТИТЫ:

- серозный периодонтит острой формы;
- гнойный острый периодонтит;
- периодонтит фиброзный, гранулирующий или гранулематозный хронической формы.

ДОСТОИНСТВА:

- подавление патогенных микроорганизмов аэробного характера;
- антибактериальное действие;
- активное действие в растворенной форме;
- термопластичность;
- идеальная консистенция;
- глубокое проникновение;
- удобная пластиковая насадка.

Гель может быть использован для лечения у детей эндодонтической патологии.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Первое посещение:

- изоляция зубной единицы от слюны;
- препаровка кариозной полости;
- разработка пульповой камеры;
- удаление остатков пульпы;
- промывка полости;
- первичная инструментальная обработка корневого канала;
- промывка раствором гипохлорита натрия;
- промывка корневого канала дистиллированной водой;
- просушка без воздушной струи;
- наполнение канала гелем;
- временная пломбировка.

Второе посещение:

- изоляция слюны;
- снятие временной пломбы;
- антисептическая и механическая подготовка канала к пломбированию;
- просушка;
- obturation корневого канала.

