



MerFill MR

MerFill MR – увлажнитель композитных материалов, который способствует восстановлению ингибированного кислородного слоя. Композитный материал Merfill MR выступает моделирующим агентом. Материал не липнет к стоматологическому инструменту и может быть использован совместно с иными видами композитных материалов для эстетической реставрации в ротовой полости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- наложение различных слоев композита при появлении излишней сухости;
- улучшает скольжение стоматологического инструмента в ходе осуществления контурирования или скульптурирования зубной ткани.

Материал является неотъемлемым при проведении эстетической реставрации ротовой полости.

ДОСТОИНСТВА:

- позволяет идеально работать с трудно моделируемыми композитами в связи с тем, что восстанавливает его пластичность;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для того, чтобы улучшить скольжение стоматологического инструмента необходимо нанести незначительное количество материала на композит или инструмент.

Если моделировочный агент применяется в качестве восстановителя ингибированного кислородного слоя композита, тогда выполняются следующие действия:

- наносится тонкий слой материала поверх ранее наложенного композита;
- раздуть воздухом препарат;
- вторично нанести реставрационный композит.

Такие способы и методы работы с препаратом MerFill MR



УПАКОВКА: MerFill MR моделирующий агент предназначенный для увлажнения композитных материалов и восстановления ингибированного кислородного слоя MerFill MR выпускается в шприцах по 3 г.

