



F&A PhosPho

F&A PhosPho – протравочный гель, который на 37% состоит из ортофосфорной кислоты со значительным количеством антисептика. Особенностью является то, что препарат не содержит диоксид кремния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- кислотное протравливание дентина и эмали.

ДОСТОИНСТВА:

- высокое содержание ортофосфорной кислоты;
- отсутствие в составе диоксида кремния;
- гелеобразная консистенция;
- синий контрастный оттенок упрощающий работу специалистов;
- оптимальное антисептическое действие;
- простое применение.

Основной особенностью материала является смывания под струей очищенной воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- нанести гель на эмаль;
 - спустя некоторое время нанести гель на дентин;
 - спустя несколько секунд смыть гель водой;
 - просушить воздушной струей.
- После осуществления процедуры эмаль становится белоснежного оттенка и упрощает дальнейшую работу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед началом работы с протравочным гелем необходимо тщательно очистить ротовую полость. Минимизировать попадание протравочного геля на мягкие ткани.



УПАКОВКА: F&A PhosPho Препарат выпускается в шприцах по 5 мл и 10 мл.

